



NETTOYAGE  
ET DÉSINFECTION RAPIDE  
DES MATÉRIAUX ET SURFACES



### PROPRIÉTÉS :

Produits prêts à l'emploi  
Large spectre d'activité microbiologique  
Parfum frais d'eucalyptus  
Fabriqué en France

### DOMAINES D'APPLICATION :

Aseptonet est une gamme de produits destinés à la désinfection rapide :  
- Des surfaces dures des dispositifs médicaux dans le cadre de la maîtrise des risques microbiologiques liés à l'environnement : lits médicalisés, monitoring, connectiques et câbles...  
- Des surfaces dures en milieu médical (cabinets médicaux, dentaires, de kinésithérapie, laboratoires ...) ou collectif ou accueillant du public (salons de coiffure, maisons de retraite, commerces, collectivités...) : poignées de portes, plans de travail, sièges, fauteuils, chaises, tables, toilettes, téléphones, sols...

ACTIVITÉ DE LA LOTION		TEMPS D' ACTIONS EN CONDITIONS DE PROPRETÉ À 20°C	
Traitement Général	Normes	Germes testés	
Bactéricidie	EN 13727* EN 1276** - EN 13697*	S. Aureus - P. Aeruginosa - E. Hirae S. Aureus - P. Aeruginosa - E. Coli - E. Hirae	5 min
Levuricidie	EN 13624* - EN 1650** - EN 13697*	C. Albicans	5 min
Bactéricidie & Levuricidie	EN 16615*	S. Aureus - P. Aeruginosa - E. Hirae - C. Albicans	5 min
Actif sur virus	EN 14476* EN 16777*	Vaccinia - Herpès - PRV - BVDV - Coronavirus - HIV - Rotavirus Vaccinia	5 min

\* 3g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton \*\* 3g/L albumine bovine

### MODE D'EMPLOI :

#### Lingettes

Passer 3 à 4 lingettes par m<sup>2</sup> de surface à nettoyer et désinfecter. Laisser agir 5 min. Ne pas rincer. Renouveler l'application chaque fois que nécessaire. Se référer au mode d'emploi sur le produit. Se laver soigneusement les mains après utilisation.

Produit biocide TP2 (Désinfectants pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux).

### DONNÉES PRODUIT :

#### Flow pack de 50 lingettes

- Référence article et FDS sur demande
- Lingettes 13x20cm
- Unités par carton 12
- Unités par palette 1080

#### Flow pack de 100 lingettes

- Référence article et FDS sur demande
- Lingettes : 18x20cm
- Unités par carton : 12
- Unités par palette : 600

### COMPOSITION :

- Didecyltriméthylammonium chlorure (n°CAS : 7173-51-5) : 0.29% (m/m) ;
- Moins de 5% d'agents de surfaces non ioniques ;
- Parfum



Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Usage réservé aux professionnels.