

Information produit

FD multi wipes/FD multi wipes compact lingettes non tissées



FD multi wipes/FD multi wipes compact - aperçu rapide

- Lingettes sèches non tissées et non pelucheuses, résistantes et de haute qualité, en boîte distributrice rechargeable.
- Utilisables de manière universelle pour les solutions de FD 300 et FD 312 ainsi que FD 322, FD 333, FD 333 forte ou FD 366 sensitive.
- Lingettes non tissées à structure fine – s’humidifient facilement et ne rayent pas les surfaces.
- Lingettes grand format 200 x 300 mm ou 290 x 300 mm.
- Action désinfectante prouvée et stabilité des solutions de principes actifs.
- Activité maximale du premier au dernier jour – utilisable pendant 28 jours à 3 mois.
- Boîte distributrice pratique pouvant être refermée et rechargée.
- Grande rentabilité – gain de temps important grâce à la fabrication unique des lingettes de désinfection imprégnées et une utilisation économe de l’agent désinfectant. Jusqu’à 180 ou 60 opérations de désinfection.

Propriétés

FD multi wipes/FD multi wipes compact du système d’hygiène Dürr sont des lingettes non tissées de haute qualité et résistantes. FD multi wipes/FD multi wipes compact conviennent de manière générale à l’imprégnation avec des produits désinfectants de surface. Dürr Dental recommande les solutions des concentrés FD 300 ou FD 312 et les préparations prêtes à l’emploi FD 322, FD 333, FD 333 forte ou FD 366 sensitive. FD multi wipes/FD multi wipes compact libèrent facilement la solution désinfectante et garantissent le mouillage complet des surfaces à désinfecter. Grâce à leur taille et leur matériau, les lingettes FD multi wipes/FD multi wipes compact se plient facilement. Elles s’adaptent à toute situation et permettent d’atteindre les petites surfaces et recoins. L’utilisation de FD multi wipes/FD multi wipes compact réduit le temps de préparation pour les actions de désinfection et diminue la consommation de l’agent désinfectant. Les lingettes imprégnées FD multi wipes/FD multi wipes compact en boîte distributrice sont protégées contre la contamination et l’évaporation.

Composition du produit

FD multi wipes sont des lingettes de dimensions 200 x 300 mm. FD multi wipes compact sont des lingettes de dimensions 290 x 300 mm.

Utilisation

FD multi wipes/FD multi wipes compact sont utilisées pour nettoyer et désinfecter les surfaces, comme par exemple les unités de soins, les plans de travail, les murs, des objets de tout genre, les appareils médicaux, etc. Préparer une solution active de FD 300 en fonction du délai d’action souhaité et avec une concentration de 1 à 4 % et de FD 312 avec une concentration de 1 à 4 %. FD 322, FD 333, FD 333 forte ou FD 366 sensitive sont des solutions prêtes à l’emploi qui sont utilisées non diluées. Imprégner uniformément les lingettes FD multi wipes en boîte distributrice avec 2,5 l d’une solution active respectivement les lingettes FD multi wipes compact en boîte distributrice avec 1,4 l d’une solution active, puis patienter 30 à 60 minutes avant la première utilisation. Inscrire sur l’étiquette jointe à chaque rouleau de lingettes le nom du produit, la concentration, la désignation du lot, la date de préparation, la date limite de conservation ainsi que le nom de la personne responsable. Collez l’étiquette sur le couvercle refermable de la boîte distributrice. Prendre une lingette et mouiller entièrement la surface à désinfecter en essuyant celle-ci. Respecter la durée d’action selon la notice de l’agent désinfectant utilisé. Enfiler des gants. Bien refermer la boîte distributrice après chaque prélèvement de lingette. Avant de recharger le produit ou de changer de produit dans la boîte distributrice, il faut éliminer tous les résidus de lingettes et de solution de la boîte et jeter l’étiquette du couvercle, puis nettoyer et désinfecter la boîte distributrice. Nettoyage et désinfection manuels : éliminer les

Information produit

FD multi wipes/FD multi wipes compact lingettes non tissées

saletés et résidus par un nettoyage mécanique. Laver soigneusement la boîte distributrice et son couvercle sur toutes les faces intérieures et extérieures à l'eau courante très chaude (>55 °C – attention au risque de brûlures pour la peau !), puis les sécher à l'aide d'un linge à usage unique. Mouiller ensuite entièrement toutes les surfaces de la boîte distributrice et de son couvercle à l'aide d'un linge à usage unique imprégné de désinfectant alcoolique rapide de façon à les désinfecter de façon fiable (respecter la durée d'action prescrite du désinfectant !). Veiller à laisser complètement sécher. Alternativement, nettoyage et désinfection automatisés : traitement et séchage de la boîte dans un appareil de nettoyage et de désinfection chimio-thermique à une température maximale de 93 °C. Placer un nouveau rouleau de lingettes dans la boîte distributrice nettoyée et séchée, imprégner les lingettes comme décrit ci-dessus, enfiler la première lingette à travers l'orifice, bien fermer le couvercle, respecter la durée de repos et coller la nouvelle étiquette correctement remplie sur le couvercle. Les boîtes contaminées ne doivent pas être nettoyées/désinfectées, mais éliminées. Les lingettes dépassant librement peuvent être contaminées et doivent donc être éliminées. Les lingettes sorties de la boîte ne doivent plus y être repoussées. Les lingettes desséchées ne doivent plus être utilisées. Changer les boîtes distributrices défectueuses.

Comportement écologique

L'emballage est en polyéthylène et polypropylène et peut donc être recyclé en tant que matière première ou exploité en tant que source d'énergie thermique. Jeter les lingettes usagées avec les déchets ménagers. Ne pas jeter dans les toilettes.

Durée de conservation

Utiliser les lingettes imbibées dans un délai de 28 jours à trois mois. Informations détaillées, voir fiche produit des préparations sur Internet.

Conditionnement

FD multi wipes :

Boîte distributrice avec 1 rouleau de 180 lingettes.
Recharge de 4 rouleaux de 180 lingettes chacun, dans un carton.

FD multi wipes compact :

Boîte distributrice avec 1 rouleau de 60 lingettes.
Recharge de 8 rouleaux de 60 lingettes chacun, dans un carton.

Remarques générales

Utilisation par du personnel spécialisé uniquement. Tout incident grave lié au produit doit être signalé rapidement au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre.



Distribution

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Allemagne
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricant

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Allemagne
www.orochemie.de
info@orochemie.com