

# Coalgan® MÈCHE

## STOP SAIGNEMENT + CICATRISATION

Nom du laboratoire	Les laboratoires Brothier
Code ACL	34 010 737 576 67 DM Classe IIb, CE 0459 - Remboursé LPP 1314953
Composition	Alginate de calcium issu des algues marines
Présentation	5 mèches stériles (4 cm)
Catégorie/Rubrique	Pansement, 1 <sup>ère</sup> urgence, 1 <sup>ers</sup> soins, saignement, cicatrisation



### INDICATIONS

- Saignements de nez
- Extractions dentaires
- Plaies superficielles (peau et muqueuses)

### LES + PRODUIT

- Recommandée par la HAS\* chez les patients avec troubles de l'hémostase
- Retrait sans douleur

### CIBLE

**POUR TOUTE LA FAMILLE :** bébés, enfants, personnes âgées, femmes enceintes...



#### CONVIENT AUSSI :

- Pour les plaies superficielles des personnes souffrant de troubles de l'hémostase congénitaux (hémophilie, Von Willebrand, Rendu-osler...) ou acquis (traitements anticoagulants, antiagrégants plaquettaires, AVK...)
- Aux personnes souffrant de retards de cicatrisation (diabétiques, dénutries...)

### MODE D'ACTION

- Au contact de la plaie, Coalgan échange ses ions calcium  $Ca^{2+}$  avec les ions sodium  $Na^{+}$  du sang/exsudat.
- Cet échange ionique entraîne la gélification de Coalgan qui sert ainsi de support à l'adhésion des plaquettes et maintient la plaie dans un environnement humide favorable à la cicatrisation. Parallèlement, l'apport de calcium dans la plaie favorise la formation du caillot sanguin et la cicatrisation.

### MODE D'EMPLOI

En cas de saignement de nez :

1. Se pencher en avant et se moucher.
2. Humidifier la mèche uniquement avec du sérum physiologique (NaCl à 0,9%) puis l'insérer dans la narine, après l'avoir torsadée et pliée en deux.
3. Pincer les 2 narines pendant 10 minutes et respirer par la bouche.
4. Retirer après 30 minutes.

Ne pas essayer de retirer les éventuelles fibres qui subsistent au retrait, elles disparaîtront d'elles-mêmes.

**Un saignement persistant nécessite un avis médical.**

### CONTRE-INDICATIONS, EFFETS INDÉSIRABLES, PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Aucune contre-indication connue à ce jour. Coalgan® contient des traces de tensio-actif, son utilisation peut provoquer des réactions d'hypersensibilité chez certains sujets sensibilisés. Coalgan doit être humidifié uniquement avec une solution de NaCl à 0,9% (sérum physiologique) : les ions  $Na^{+}$  de la solution NaCl s'échangent avec les ions  $Ca^{2+}$  de Coalgan ce qui permet la gélification et le retrait indolore de Coalgan. Coalgan ne doit pas être utilisé avec les solutions alcalines, telles que les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivre. Vérifier l'intégrité du sachet avant l'utilisation du produit.

**Existe aussi sous forme de compresse, pansement adhésif et poudre.**

\*Recommandé par la HAS (Haute Autorité de Santé) pour les patients avec troubles de l'hémostase - Les pansements : indications et utilisations recommandées - avril 2011



[www.coalgan-gamme.com](http://www.coalgan-gamme.com)

**BROTHIER**  
LABORATOIRES

Coalgan® MÈCHE, POUDRE, ADHÉSIF, COMPRESSE sont destinés à l'hémostase et à la cicatrisation. Dispositifs médicaux, CE-0459, classe IIb pour Coalgan MÈCHE, ADHÉSIF, COMPRESSE, classe IIa pour Coalgan POUDRE. Coalgan MÈCHE, est remboursé LPP sous nom de marque avec un prix limite de vente pour les indications : épistaxis et autres saignements cutanés et muqueux chez les patients présentant des troubles de l'hémostase congénitaux ou acquis. Coalgan® POUDRE et ADHÉSIF, indiqués pour les plaies cutanées superficielles, Coalgan® COMPRESSE pour les saignements de nez et les plaies superficielles. Non remboursés par l'Assurance Maladie. Lire les notices avant utilisation. Coalgan®, marque déposée de Brothier. Fabriqués en France par les Laboratoires Brothier, SAS au capital de 2 646 000 €, 41 rue de Neuilly, 92000 Nanterre (France), RCS Nanterre B 572 156 305. MTP25COG010A – avril 2025.

Document réservé exclusivement aux professionnels de santé.