

# DIGITEST<sup>®</sup> 3

Testeur digital de la vitalité pulpaire

## Affiner l'origine de la douleur de votre patient

- Test sur une seule dent
- Fonctionnement intuitif à l'aide d'un seul bouton
- Plusieurs réglages disponibles afin de s'adapter à vos préférences personnelles
- Étalonnage automatique pour une installation rapide et facile
- Conception ergonomique
- Quatre électrodes autoclavables (incluses) dont l'extrémité se positionne facilement sur toutes les surfaces de la dent
- La pile 9V standard se change aisément au cabinet



## Passez au niveau supérieur de vos compétences en matière de diagnostic

Lorsque la percussion, la glace, la chaleur et les radiographies ne suffisent pas, la stimulation électrique peut être l'outil de diagnostic dont vous avez besoin pour déterminer l'origine de la gêne du patient. C'est là qu'intervient le Digitest<sup>®</sup> 3.

## Comment fonctionne-t-il ?

Le Digitest<sup>®</sup> 3 stimule électriquement la dent pour tester sa vitalité. Comparer la réponse à un stimulus identique de la dent suspecte avec celle d'une dent saine connue peut vous aider à objectiver l'origine de la douleur du patient.

Le testeur de vitalité pulpaire Digitest<sup>®</sup> 3 permet aux praticiens d'affiner le diagnostic sur une dent problématique pour laquelle le traitement aurait du être différé jusqu'à ce que le problème s'identifie clairement. Le Digitest<sup>®</sup> 3 est une solution rapide, fiable et reproductible sur dents matures.

## Conseils d'utilisation


Placer un gel conducteur comme du dentifrice sur la dent avant de placer l'électrode.

Sur les dents antérieures et les prémolaires maxillaires placer l'embout de l'électrode sur les 2/3 occlusaux de la surface coronaire vestibulaire.

Pour les molaires placer l'embout de l'électrode au sommet de la cuspidé mésio-vestibulaire.



Product reviewed by

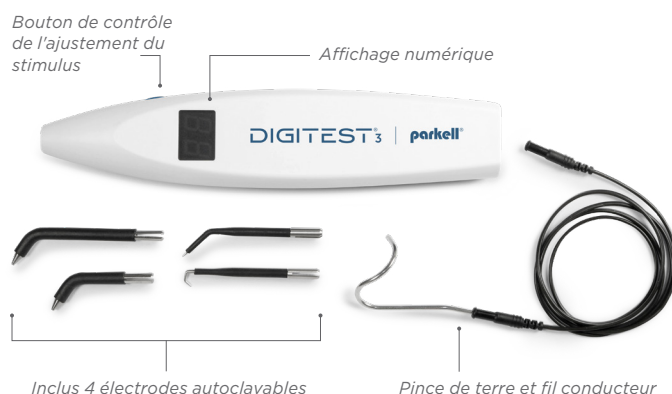

REF #	DESCRIPTION DU PRODUIT
D655	<b>Digitest<sup>®</sup> 3 Testeur de vitalité pulpaire</b> 4 Électrodes autoclavables (1 standard long, 1 standard court, 1-labial, 1-lingual), 1 Pince de terre, 1 Fil conducteur, 1 Pile 9V
D636	<b>Jeu d'électrodes de précision</b>   2 sondes (une labiale, une linguale)
D625	<b>Jeu d'électrodes standard</b>   2 sondes (une courte et une longue)
D631GC	<b>Clip de mise à la terre et fil conducteur</b>   2 Clips, 1 Fil conducteur



Produits disponibles chez les principaux distributeurs.  
Parkell est le fabricant par définition du MOD98/42/CEE.  
Produits mentionnés de classe IIa

Pour en savoir plus et pour passer commande contacter  
[infoeurope@parkell.com](mailto:infoeurope@parkell.com) ou appeler au +46 8 506 505 75

**parkell**<sup>®</sup>