

ProCare

Dent 40



Produit de rinçage

Concentré liquide. Pour le traitement en machine d'instruments dentaires y compris l'instrumentation rotative dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.


Particularité

ProCare Dent 40 répond aux exigences de la directive 93/42/CEE, annexe I sur les dispositifs médicaux. 

Caractéristiques produit

- Améliore et accélère le séchage des instruments dentaires lors d'un lavage en machine
- Permet de neutraliser les résidus alcalins et les eaux alcalines

ProCare Dent 40 est réservé à une utilisation professionnelle.

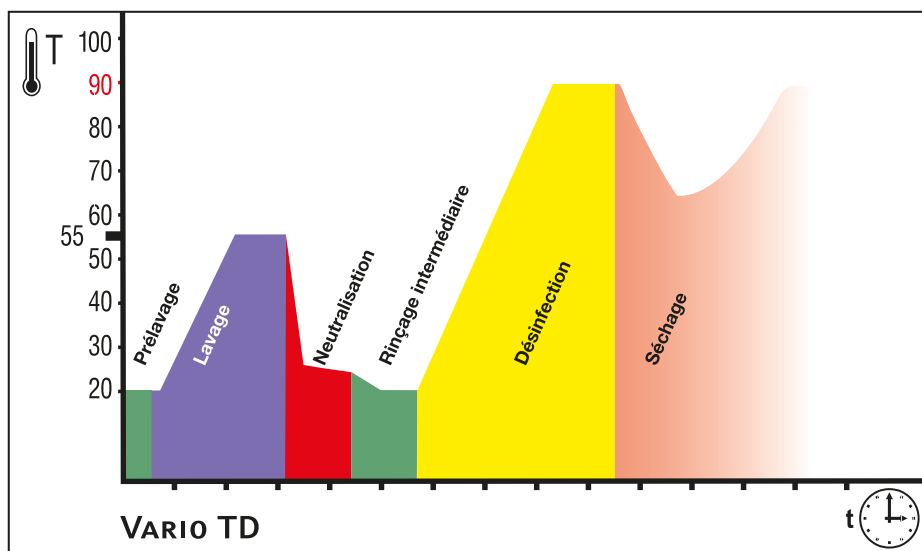

Application et dosage

Miele ProCare Dent 40 est adapté au traitement des instruments dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

- Concentration : 0,3ml/l par dispositif de dosage pour produit de neutralisation
- Choix de programme vario TD

Nous conseillons l'utilisation d'eau déminéralisée pour la phase de rinçage final afin d'éviter les dépôts et les taches d'eau et afin de protéger l'aluminium anodisé.

Déroulement du procédé Vario TD

- Prélavage à l'eau froide pour éliminer les salissures grossières (par ex. sang)
- Lavage
- Neutralisation
- Rinçage intermédiaire avec de l'eau froide
- Désinfection thermique à 93°C avec temps de maintien pendant 5 minutes et rinçage final avec ProCare Dent 40 (température de dosage 93 °C)
- Séchage

Attention !

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Contactez le SAV Miele pour un remplacement de produit.
- Le traitement en machine doit se faire en conformité avec la directive de l'institut Robert Koch et la loi allemande sur les dispositifs médicaux avec des procédures validées.
- Veuillez suivre les indications des fabricants d'instruments conformément à la norme DIN EN ISO 17664.
- Tenez compte des indications des modes d'emploi des laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

ProCare

Dent 40



Caractéristiques techniques

- Densité (20°C) : 1,1 g/cm³
- Valeur pH (déterminée pour de l'eau déminéralisée, 20°C) 0,3 ml/l : env. 3,8

Composants dangereux conformément au décret CE 648/2004

- < 5% de phosphates
- 15 – 30% d'agents tensio-actifs non ioniques
- Agents conservateurs (**méthylchloroisothiazolinone / méthylisothiazolinone**)

Conseils de stockage

- Température de stockage : 0°C à 30°C
- Stockage jusqu'à 3 ans si les consignes de stockage sont respectées
- Utilisable jusqu'au : voir étiquette derrière le symbole 

Prescriptions de sécurité

- ProCare Dent 40 n'est pas considéré comme une substance à risque selon les critères de la directive 99/45/CE

N'éliminez l'emballage que lorsqu'il est vide et fermé. Elimination des restes de produit : voir la fiche des données de sécurité.

Vous trouverez d'autres informations concernant la sécurité et l'environnement dans les fiches de sécurité éditées par l'UE. Ces dernières sont disponibles en français sous www.miele-professional.fr

Les informations de cette fiche se réfèrent à nos connaissances actuelles. Elles ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer ses propres contrôles et ses propres tests. Ces informations ne doivent pas servir de base légale faisant référence.

Unité d'emballage livrable

Désignation	emballage	numéro de produit
ProCare Dent 40	1 flacon de 1 l	9 052 130

Contact :

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 666
www.miele-professional.de

MIELE SAS
9 avenue Albert Einstein
BP 1000
ZI du Coudray
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
Téléphone 01 49 39 44 00
www.miele-professional.fr



Usine de produits chimiques
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de