

COVID-19

NOTICE D'UTILISATION



pafil[®]
Clothing Industry

MASQUE GRAND PUBLIC

RÉFÉRENCE DU PRODUIT: PFLPROTECT02.BA

MASQUE - UNISEXE

ADULTE - GRAND



Domaine d'utilisation:

Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues (entreprise, service, bureau. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public.

Performances: EN 14683: 2019

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 70%

**Respirabilité: essai de perméabilité à l'air > 96 L / m2.s
pour une dépression de 40 Pa.**

Instruction pour usage:

- Ce masque doit être utilisé en complément des mesures de protection et règles d'hygiène et de distanciation sociale recommandées, qui sont fondamentales pour le contrôle de COVID-19. Pour plus d'informations, consultez <https://covid19.min-saude.pt>.
- Le Masque réutilisable doit être manipulé correctement :
Suivez les instructions recommandées pour une utilisation correcte du masque, selon le guide de la DGS (Direction Générale de la Santé Portugaise) N°019/2020, de 03/04/2020.
 - a) L'hygiénisation des mains, avec de l'eau et du savon ou bien avec une solution d'alcool avant de mettre le masque sur le visage ;
 - b) Mettre le masque avec la face intérieure tournée vers le visage et la face extérieure tournée vers l'extérieure ;
 - c) Ajuster l'extrémité rigide du masque au nez, en couvrant la bouche, le nez et le menton avec le masque.
 - d) Le masque ne doit pas être touché pendant son utilisation ; si jamais ça arrive l'hygiénisation des mains doit être effectuée immédiatement.
 - e) Il est recommandé d'utiliser chaque masque pendant une période maximale de 4 heures par jour, et le remplacer par un nouveau à la fin de cette période ou dès qu'il est mouillé.
 - f) Si vous mouillez accidentellement le masque, vous devez le remplacer par un masque sec dès que possible. Le masque humide doit être lavé avant d'être réutilisé ;
 - g) Le masque doit être retiré de l'arrière vers l'avant (sans toucher le devant du masque), en tenant les liens ou l'élastique.

 Rua Nº 5ª da Apresentação Nº239
4775 - 258 Viatodos
Barcelos - Portugal

 +351 252 961 560

 protect.covid19@pafil.pt

 www.pafil.pt

OEKO-TEX[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STeP
16000153 CITEVE

Sustainable Textile Production.
www.oeko-tex.com/step




COVID-19

NOTICE D'UTILISATION

pafil[®]
Clothing Industry

- h) En aucun moment le masque doit être conservé autour du cou pour être réutilisé ;
- i) Le masque doit être placé individuellement dans un sac en plastique fermé, jusqu'à ce qu'il soit placé dans la machine à laver ;
- j) Une nouvelle hygiène des mains doit être effectuée à la fin de l'utilisation et de la manipulation du masque

- Le masque doit être lavé avant réutilisation et doit respecter le nombre de cycles de lavage spécifiés par le fabricant.
- La protection du masque n'est garantie que si vous suivez les instructions de nettoyage et d'entretien qui suivent :
- Le masque doit être stocké dans un environnement sec et protégé de toute contamination potentielle (initialement ou après lavage)
- Le masque doit être lavé avant la première utilisation.
- En cas de défaut ou de dommage n'utilisez pas le masque, remplacez-le par un autre.
- A la fin du cycle de vie du masque, laver le masque dans les conditions définies au point "Conservation et nettoyage" et après le lavage, il doit être jeté comme déchet textile non dangereux. Si vous choisissez de ne pas laver le masque, vous devrez le jeter comme déchet biologique.

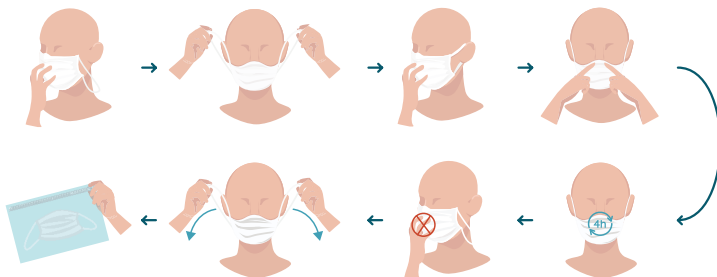

Conservation et nettoyage :

- Les masques doivent être lavés en utilisant un cycle de lavage normal à 60° C avec du détergent, après chaque utilisation. L'utilisateur doit s'assurer que le masque est bien sec avant utilisation.



Lavage autorisé à 60°C.



L'utilisation d'hypochlorite est interdite.



Le séchage au tambour est interdit.



Repasse autorisé à 110°C.



Nettoyage à sec interdit.

- Conformité vérifiée par le certificat du "CITEVE n.o 6796/2020"

Rua N° Sª da Apresentação N°239
4775 - 258 Viatodos
Barcelos - Portugal

+351 252 961 560
protect.covid19@pafil.pt
www.pafil.pt

OEKO-TEX[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STeP
16000153 CITEVE

Sustainable Textile Production.
www.oeko-tex.com/step

