

Information produit

Orotol® plus Désinfection des systèmes d'aspiration



Orotol® plus - aperçu rapide

- Concentré pour la désinfection, la désodorisation, le nettoyage et l'entretien simultanés des systèmes dentaires d'aspiration, des séparateurs d'amalgame et des crachoirs.
- Large spectre d'action: bactéricide, lévuricide, virucide à action limitée (virus enveloppés tels que VHB, VHC, VIH ainsi que coronavirus), adénovirus et norovirus non enveloppés.
- Testé selon les méthodes actuelles de la VAH et les normes européennes. Activité virucide limitée selon la directive DVV/RKI
- Liste VAH, liste des désinfectants de l'IHO.
- La solution pour les systèmes d'aspiration contaminés – protection sûre contre les infections.
- Concentration d'utilisation: seulement 2 %.
- Pouvoir nettoyant exceptionnel – élimine les dépôts les plus tenaces même aux endroits difficiles d'accès.
- Sans aldéhyde – agit sur la base de composés d'ammonium quaternaire.

Propriétés

Orotol® plus de la gamme de produits d'hygiène Dürr Dental est un concentré puissant pour la désinfection, la désodorisation, le nettoyage et l'entretien simultanés de tous les systèmes dentaires d'aspiration, des séparateurs d'amalgame et des crachoirs. Les composants désinfectants et nettoyeurs sélectionnés garantissent un entretien intensif sans mousse qui ménage les matériaux et l'environnement. Une utilisation quotidienne d'Orotol® plus garantit un fonctionnement techniquement et hygiéniquement parfait des systèmes d'aspiration et des séparateurs d'amalgame, même en cas de contamination et de souillure importantes (par ex.: salive, poussière d'amalgame et de dentine, sang, etc.).

Composition du produit

Orotol® plus est une combinaison de composés d'ammonium quaternaire, d'agents nettoyants alcalins, d'agents de chélation, d'agents anti-mousse et d'adjuvants en solution aqueuse. 100 g d'Orotol plus contiennent 4,4 g de chlorure de diméthylodioctylammonium, 0,6 g de chlorure de benzyldiméthylodécylammonium.

Efficacité microbiologique

Orotol® plus exerce un effet bactéricide, lévuricide, virucide à action limitée (virus enveloppés tels que VHB, VHC, VIH ainsi que les coronavirus), adénovirus et norovirus non enveloppés. Orotol® plus figure sur la liste VAH et la liste des désinfectants de l'IHO. Produit contrôlé sous une forte charge selon les normes EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476, EN 17111 et la directive DVV/RKI.

Utilisation

Orotol® plus est utilisé à une concentration de 2 %. Ajouter de l'eau froide à 20 ml d'Orotol® plus pour obtenir 1 l et aspirer, par ex., à l'aide d'OroCup. Verser également 250 ml de solution au minimum dans le crachoir. La durée d'action selon la VAH est de 2 % – 5 min. (bactéricide/lévuricide). Une inactivation des virus se fait à 2 % – 30 min. jusqu'à 60 min. Nous recommandons un traitement à la fois nettoyant et désinfectant du système d'aspiration par Orotol® plus une ou deux fois par jour avant la pause de midi et à la fin de la journée et uniquement à la fin de la journée en cas de traitement unique selon la charge présente. Nettoyer et désinfecter également le crachoir avec Orotol® plus le cas échéant. Respecter les instructions du fabricant du dispositif ainsi que les prescriptions nationales.

Comportement écologique

L'emballage est en polyéthylène et polypropylène et peut donc être recy-

Information produit

Orotol[®] plus désinfection des systèmes d'aspiration

clé en tant que matière première ou exploité en tant que source d'énergie thermique. Rincer la bouteille à l'eau pour le recyclage.

Pour de plus amples informations, voir la fiche de données de sécurité.

Caractéristiques physiques

Concentré:

Aspect: liquide jaune transparent

Densité: $D = 1,09 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

pH: $12,8 \pm 0,3$

Solution (2 %):

Aspect: solution incolore

pH: $10,5 \pm 0,5$

Durée de conservation

Concentré: 3 ans

Solution 2 %: 1 jour

Conditionnement

Bouteille de 2,5 l

Conservation

Conserver le produit à des températures supérieures à 5 °C, mais ne dépassant pas une température ambiante.

Accessoires

OroCup

Remarques générales

Après toute intervention chirurgicale, aspirer par à-coups l'équivalent d'un verre d'eau froide. Ne jamais utiliser de produits moussants dans le système d'aspiration et le crachoir. Ne pas mélanger la solution Orotol[®] plus avec d'autres produits. Des écarts de couleur/odeur, en particulier en cas de stockage à la lumière du soleil, sont possibles. Ces altérations de la couleur ou de l'odeur sont cependant sans conséquence sur le pouvoir désinfectant du produit. Utilisation par du personnel spécialisé uniquement. Tout incident grave lié au produit doit être signalé immédiatement au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre.

Indications de danger

Orotol[®] plus est soumis à la classification et à la signalisation conformément au règlement CLP: voir l'étiquetage et la fiche de données de sécurité du produit.

Rapports d'expertise indépendants et études propres

Les rapports d'expertise sont disponibles sur demande.

CE 0124

Utilisation		Rapport concentration/durée
Recommandation d'utilisation pour la désinfection des systèmes d'aspiration selon la VAH (désinfection des surfaces et des instruments)		Bactéricide/lévuricide 2 % - 5 min.
Spectre d'action	Contrôlé selon	Rapport concentration/durée
Bactéries et levures		
Bactéricide/lévuricide	EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 16615	2 % - 5 min.
Virus		
Virucide à action limitée (virus enveloppés, tels que VHB, VHC, VIH ainsi que les coronavirus)	EN 14476, EN 17111	2 % - 30 min. ¹⁾
	Directive RKI/DVV	2 % - 30 min.
Adénovirus	EN 14476, EN 17111	2 % - 30 min. ²⁾
Norovirus	EN 14476, EN 17111	2 % - 60 min.

1) EN 14476 avec faible charge. Charge élevée: 2 % - 60 min.

2) EN 14476 avec faible charge. Charge élevée: 2 % - 2 heures

Distribution

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricant

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de