

Information produit

Concentré révélateur Periomat Intra/C⁺



Concentré révélateur Periomat Intra/C⁺ - aperçu rapide

- Concentré révélateur mono-composant pour développer les films radiologiques intra-oraux.
- Exempt d'hydroquinone et d'aldéhydes.
- Utilisation simple : verser – diluer – c'est prêt.

Propriétés

Le concentré révélateur Periomat Intra/C⁺ est un révélateur conçu spécialement pour les développeuses de Dür Dental prévues uniquement pour les films radiologiques intra-oraux. La fonction du révélateur Periomat Intra/C⁺ consiste à rendre visible sur le film radiologique l'image latente produite par les rayons X ou la lumière. Pendant cette opération, les cristaux de bromure d'argent sont réduits en argent métallique par des substances révélatrices organiques. Cela provoque un noircissement du film.

Composition du produit

Le concentré révélateur Periomat Intra/C⁺ est alcalin. Il contient de l'acide ascorbique et du Dimezone S comme substances révélatrices, du sulfite de potassium comme antioxydant, des carbonates, des stabilisateurs et des adjuvants en solution aqueuse.

Utilisation

Le concentré révélateur Periomat Intra/C⁺ est fourni sous forme de concentré mono-composant. La solution doit être préparée conformément aux instructions d'emploi. Une préparation donne 1 l de solution prête à l'emploi de révélateur.

Comportement écologique

Les bains révélateurs usés doivent être éliminés en application du règlement local en vigueur (code déchet : CED 090101). L'emballage est en polyéthylène et polypropylène et peut donc être recyclé en tant que matière première ou exploité en tant que source d'énergie thermique. Rincer la bouteille à l'eau pour le recyclage. Pour de plus amples informations, voir la fiche de données de sécurité.

Durée de conservation

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption imprimée sur le produit.

Solution :

3 semaines à 20 °C ou 24/25 °C avec chauffage des bains et 350 films intra-oraux (format 3 cm x 4 cm) au maximum avec Periomat et Periomat Plus de Dür Dental ou 200 films intra-oraux (format 3 cm x 4 cm) avec la XR 04.

Conditionnement

Set comprenant :

- 4 x bouteilles de 500 ml de concentré révélateur
 - 4 x bouteilles de 500 ml de concentré fixateur
- Concentrés mono-composant pour 4 préparations (pour 4 x 1 l de solution de révélateur et 4 x 1 l de solution de fixateur)

Information produit

Concentré révélateur Periomat Intra/C⁺

Conservation

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Remarques générales

Ne pas mélanger le concentré fixateur Periomat Intra/C⁺ avec d'autres produits. Cela entraîne une perte de performance du produit. Utilisation par du personnel spécialisé uniquement. Tout incident grave lié au produit doit être signalé rapidement au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre.

Accessoires

Nettoyant à vaporiser WR 2000

Indications de danger

Le concentré révélateur Periomat Intra/C⁺ est classé et marqué selon le règlement CLP. Pour de plus amples informations, voir la fiche de données de sécurité.

pH : 10,0 – 11,0



Distribution

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Allemagne
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricant

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Allemagne
www.orochemie.de
info@orochemie.com

Information produit

Concentré fixateur Periomat Intra/C⁺



Concentré fixateur Periomat Intra/C⁺ - aperçu rapide

- Concentré fixateur mono-composant pour le fixage des films radiologiques intra-oraux.
- Archivage sûr.
- Utilisation simple : verser – diluer – c'est prêt.

Propriétés

Le bain fixateur Periomat Intra/C⁺ est un bain fixateur rapide parfaitement adapté à toutes les développeuses de Dürre Dental prévues uniquement pour les films radiologiques intra-oraux. La fonction du concentré fixateur Periomat Intra/C⁺ consiste à retirer du film le bromure d'argent non réduit. À l'aide de substances tampon, le bain fixateur doit en outre garantir un pH toujours constant et ce, même si une certaine quantité de révélateur est importée avec le film. La troisième fonction consiste à durcir la couche gélatineuse du film pour éviter tout décollement de la substance porteuse.

Composition du produit

Le bain fixateur Periomat Intra/C⁺ est faiblement acide et contient du thiosulfate d'ammonium pour le fixage, du sulfite de sodium comme anti-oxydant, des acides organiques, des adjuvants en solution aqueuse.

Utilisation

Le concentré fixateur Periomat Intra/C⁺ est fourni sous forme de concentré mono-composant. La solution doit être préparée conformément aux instructions d'emploi. Une préparation donne 1 l de solution.

Comportement écologique

Les bains fixateurs usés doivent être éliminés conformément aux dispositions légales en vigueur (code déchet : CED 090104). L'emballage est en polyéthylène et polypropylène et peut donc être recyclé en tant que matière première ou exploité en tant que source d'énergie thermique. Rincer la bouteille à l'eau pour le recyclage. Pour de plus amples informations, voir la fiche de données de sécurité.

Durée de conservation

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption imprimée sur le produit.

Solution :

3 semaines à 20 °C ou 24/25 °C avec chauffage des bains et 350 films intra-oraux (format 3 cm x 4 cm) au maximum avec Periomat et Periomat Plus de Dürre Dental ou 200 films intra-oraux (format 3 cm x 4 cm) avec la XR 04.

Conditionnement

Set comprenant :

- 4 x bouteilles de 500 ml de concentré révélateur
- 4 x bouteilles de 500 ml de concentré fixateur
- Concentrés mono-composant pour 4 préparations (pour 4 x 1 l de solution de révélateur et 4 x 1 l de solution de fixateur)

Information produit

Concentré fixateur Periomat Intra/C⁺

Conservation

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Remarques générales

Ne pas mélanger le concentré fixateur Periomat Intra/C⁺ avec d'autres produits. Cela entraîne une perte de performance du produit. Utilisation par du personnel spécialisé uniquement. Tout incident grave lié au produit doit être signalé rapidement au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre.

Accessoires

Nettoyant à vaporiser WR 2000

Indications de danger

Le concentré fixateur Periomat Intra/C⁺ est classé et marqué selon le règlement CLP. Pour de plus amples informations, voir la fiche de données de sécurité.

pH : 4,5 – 5,5



Distribution

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Allemagne
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricant

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Allemagne
www.orochemie.de
info@orochemie.com