

# Information produit

## MD 555 cleaner organic

### Nettoyant spécial pour systèmes d'aspiration



#### MD 555 cleaner organic – aperçu rapide

- Nettoyant spécial non-moussant à base d'acide citrique pour les systèmes dentaires d'aspiration et leurs écoulements lorsque la qualité de l'eau pose problème (exemple: dureté élevée de l'eau, sels peu solubles, etc.) ainsi qu'en cas de pente insuffisante des tuyaux d'écoulement.
- Particulièrement recommandé en cas d'utilisation d'appareils spéciaux de nettoyage dentaire, comme par exemple les appareils à jet de poudre et leurs poudres prophylactiques ou les produits sous forme de perles.
- Nettoyage puissant et intensif – élimine efficacement les dépôts et prévient leur formation résultant d'une mauvaise qualité d'eau dans les systèmes d'aspiration ou sur les surfaces résistantes aux acides.
- Très bonne compatibilité avec les matériaux, convient à tous les équipements avec récupérateur d'amalgame.
- Sans parfum ni colorants.
- Complète idéalement Orotol® plus pH 7, Orotol® plus, ou Orotol® ultra et MD 550 pour la désinfection, le nettoyage et l'entretien complets de tous les systèmes d'aspiration.

#### Propriétés

MD 555 cleaner organic est un nettoyant spécial non moussant à base d'acide citrique pour les systèmes dentaires d'aspiration et leurs écoulements. MD 555 cleaner organic est sans parfum ni colorants. L'utilisation de MD 555 cleaner organic est recommandée lorsque la qualité de l'eau pose problème (par ex: dureté élevée de l'eau, sels peu solubles, etc.) ainsi qu'en cas de pente insuffisante des tuyaux d'écoulement. MD 555 cleaner organic est en outre préconisé en cas d'utilisation d'appareils spéciaux de nettoyage dentaire, par ex., les appareils à jet de poudre. Utilisé régulièrement, MD 555 cleaner organic prévient la formation des dépôts dans les systèmes d'aspiration. L'obstruction des systèmes d'aspiration par les produits de prophylaxie peu solubles tels que les poudres de prophylaxie ou les produits spéciaux sous forme de perles à base de carbonates de calcium est évitée et les dépôts existants sont éliminés. Grâce à ses composants nettoyants spéciaux, MD 555 cleaner organic convient pour toutes les installations équipées de séparateurs d'amalgame. De plus, MD 555 cleaner organic peut servir de nettoyant universel partout où des dépôts dus à la dureté de l'eau sont à éliminer.

#### Composition du produit

MD 555 cleaner organic contient de l'acide organique (40 à 50 %), des agents tensioactifs non moussants (< 1 %) et des adjuvants.

#### Utilisation

MD 555 cleaner organic s'utilise à une concentration de 5 % au moins deux fois par semaine, par ex., le matin avant le premier traitement ou pendant la pause de midi, en cas de dureté élevée de l'eau ou d'utilisation de poudres de prophylaxie. Ajouter de l'eau froide à 100 ml, ou 5 capuchons de fermeture, de MD 555 cleaner organic pour obtenir 2 l et aspirer 1 l, par ex., à l'aide de l'OroCup. Verser le reste de la solution dans le crachoir. La durée d'action minimale est de 30 minutes et peut être prolongée jusqu'à 120 minutes en cas de besoin, par ex, en cas de contamination élevée.

Alternativement, MD 555 cleaner organic peut être utilisé tous les jours sous forme de solution à 5 %. La durée d'action minimale est alors de 5 minutes et peut être prolongée jusqu'à 15 minutes en cas de besoin, par ex., en cas de contamination élevée.

Dans les cas problématiques, par ex., l'assainissement d'un système d'aspiration fortement chargé en biofilm, utiliser MD 555 cleaner organic à une concentration de 10 % (ajouter de l'eau à 200 ml de MD 555 cleaner organic pour obtenir 2 l et aspirer 1 l) au moins deux fois par semaine – ici en alternance avec des produits désinfectants de la série Orotol®. Verser le

# Information produit

## MD 555 cleaner organic

### Nettoyant spécial pour systèmes d'aspiration

reste de la solution dans le crachoir. La durée d'action dans ce cas est de 1-2 heures.

#### Comportement écologique

L'emballage est en polyéthylène et polypropylène et peut donc être recyclé en tant que matière première ou exploité en tant que source d'énergie thermique. Rincer la bouteille à l'eau pour le recyclage.

Pour de plus amples informations, voir la fiche de données de sécurité.

#### Durée de conservation

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption imprimée sur le produit.

#### Conditionnement

Bouteille de 2,5 l

Bouteille de 1 l

#### Conservation

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

#### Accessoires

OroCup

#### Remarques générales

Ne pas mélanger la solution MD 555 cleaner organic avec d'autres produits. Avant et après une utilisation de MD 555 cleaner organic, rincer soigneusement les systèmes d'aspiration avec au moins 1 l d'eau. MD 555 cleaner organic ne doit pas être utilisé sur des surfaces en aluminium et autres surfaces sensibles aux acides. Ne pas laisser agir MD 555 cleaner organic pendant la nuit. Des écarts de couleur/odeur, en particulier en cas de stockage à la lumière du soleil, sont possibles. Ces altérations de la couleur ou de l'odeur sont cependant sans conséquence sur le pouvoir nettoyant du produit. Utilisation par du personnel spécialisé uniquement. Tout incident grave lié au produit doit être signalé rapidement au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre

#### Indications de danger

MD 555 cleaner organic est soumis à la classification et signalisation selon le règlement CLP: voir l'étiquetage et la fiche de données de sécurité du produit.

Concentré: Valeur pH: < 1,0

Solution prête à l'emploi (5 %): Valeur pH: 1,5-2,5

#### Rapports d'expertise indépendants et propres études

Les rapports d'expertise sont disponibles sur demande.



#### Distribution

Dürr Dental SE  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Allemagne  
[www.duerdental.com](http://www.duerdental.com)  
[info@duerrdental.com](mailto:info@duerrdental.com)

#### Fabricant

orochemie GmbH + Co. KG  
Max-Planck-Straße 27  
70806 Kornwestheim  
Allemagne  
[www.orochemie.de](http://www.orochemie.de)  
[info@orochemie.com](mailto:info@orochemie.com)