


Informations produits

Masques 3M™ Aura™



Masques de protection respiratoire 3M™ Aura™ 1862+ et 1863+

Les masques de protection respiratoire aident à protéger les porteurs en réduisant l'exposition aux particules en suspension dans l'air pouvant être générés lors de procédures médicales (bioaérosols, poussières, brouillards, etc.).

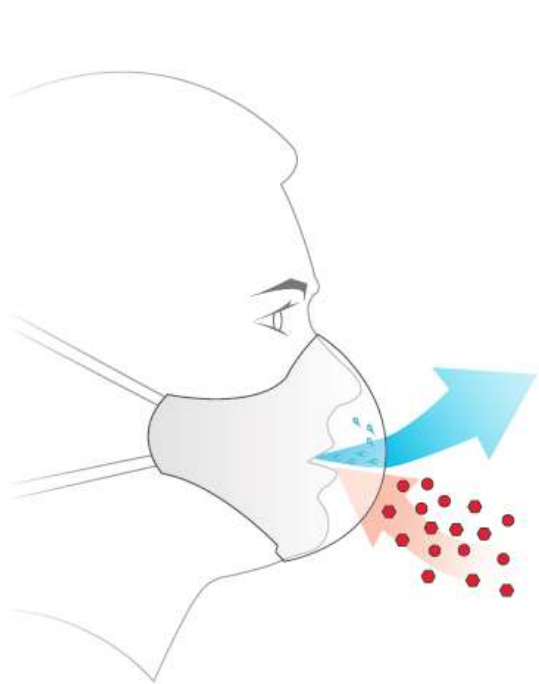

Masque 1862+
FFP2



Masque 1863+
FFP3

- Masques double homologation : équipement de protection individuelle (EPI) et dispositif médical (DM) conformément à la directive européenne (93/42/CEE)

Modèle	Classification EN 14683	Classification EN 149	Soupape d'expiration
Masques de protection respiratoire médicaux 3M™ Aura™ 1862+	IIR	FFP2 NR D	Non
Masques de protection respiratoire médicaux 3M™ Aura™ 1863+	IIR	FFP3 NR D	Non

Masques de protection respiratoire 3M™ Aura™ 1862+ et 1863+


Inspirez plus librement

Les masques de protection respiratoire 3M™ Aura™ sont dotés de la technologie de filtration à faible résistance de 3M : un média filtrant innovant qui permet de réduire la résistance respiratoire. Cela permet une haute performance de filtration avec moins d'effort à réaliser par le porteur, ce qui rend la protection encore moins intrusive.

Jusqu'à **77 %** de confort respiratoire en plus

Lors des tests effectués selon la norme EN 149, à un débit de 95 litres par minute, la résistance respiratoire moyenne approximative à l'inspiration atteinte avec les masques 3M™ Aura™ était inférieure de 68 % pour un masque FFP2 et inférieure de 63 % pour un masque FFP3.

Résistance respiratoire moyenne* des masques de protection respiratoire 3M™ Aura™ selon les exigences de la norme EN 149:2001+A1:2009

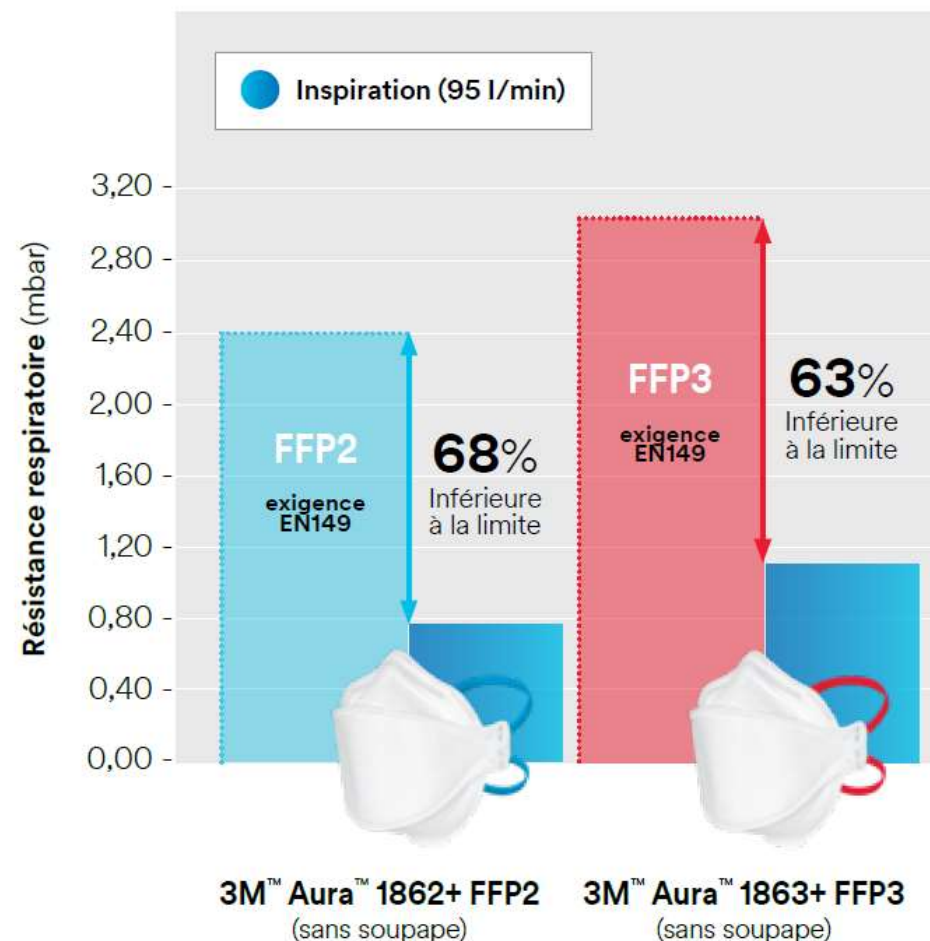

Masques de protection respiratoire 3M™ Aura™ 1862+ et 1863+

Aisance respiratoire

Technologie de filtration à faible résistance

- Associe les avantages et la technologie de filtration avancée du media filtrant 3M™ Electret
- Offre une performance de filtration efficace tout en réduisant la résistance respiratoire
- Améliore l'aisance et le confort respiratoires

Commodité

- Emballage hygiénique individuel pour protéger le masque de toute contamination avant utilisation
- Compatible avec la plupart des lunettes de sécurité 3M™

Mentonnière innovante

- Facilite la mise en place et l'ajustement pour un port confortable

Une vision nette

Panneau supérieur embossé


- Contribue à réduire la formation de buée sur les lunettes

Panneau nasal embossé

- Conception incurvée et ergonomique
- S'adapte bien aux contours du nez et des yeux
- Offre un bon champ de vision
- Accroît la compatibilité avec les lunettes

Confort de la tête et du visage

- Conception ingénieuse en 3 panneaux épousant de nombreuses formes et tailles de visage
- Adapté aux mouvements de votre visage
- Résistant à l'écrasement, idéal pour le travail dans des environnements chauds et humides
- Reste bien en place, assurant ainsi une bonne étanchéité et un confort optimal
- Mousse nasale large et souple et doublure intérieure soyeuse ultra douces pour la peau, créant un environnement confortable pour le visage

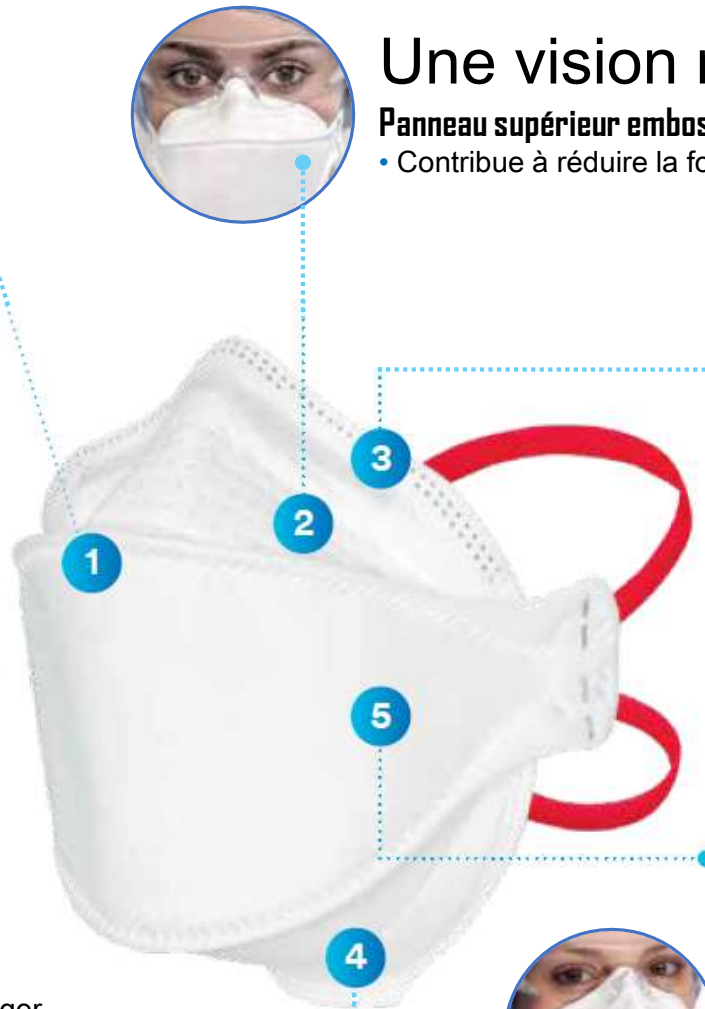



Outils à disposition



À votre disposition : Protocoles de pose

3M Science.
Applied to Life.™

Protocole d'utilisation

Masques de protection respiratoire 3M™

Identification du sens du masque et mise en forme



- ▶ La barrette nasale définit la partie supérieure du masque.
Donner au masque la forme désirée en le dépliant délicatement par le centre à l'aide du pouce et de l'index.
Maintenir le masque avec la main et tirer sur l'extrémité du pli inférieur pour l'ouvrir.

Mise en place du masque



- ▶ Retourner le masque de telle sorte que les bandes élastiques puissent pendre librement.



- ▶ Placer le masque sous le menton, la barrette nasale en haut et l'appliquer sur le visage.
Prendre la bande élastique inférieure et la ramener sur la nuque, prendre ensuite la bande supérieure et la ramener en haut derrière la tête.



- ▶ Ajuster les bords supérieurs et inférieurs de façon à bien positionner le masque sur le visage.

Ajustement du masque et vérification de l'étanchéité



- ▶ En utilisant l'index et le majeur des deux mains, presser la barrette nasale conformable autour du nez, pour assurer une parfaite étanchéité.
Presser la barrette nasale avec une seule main peut entraîner une étanchéité imparfaite.



- ▶ L'étanchéité du masque devra être vérifiée avant d'entrer dans l'atmosphère polluée.
Pour vérifier l'étanchéité au visage, couvrir la partie frontale du masque avec les deux mains en coquille (en faisant attention à ne pas en modifier la position) et inspirer très fortement.
Le masque doit s'écarter sous les mains.

Si vous détectez une fuite d'air autour du nez, réajustez la barrette nasale et la position du masque sur le visage.
Si en expirant, vous notez des fuites d'air aux extrémités du masque, réajustez la tension des élastiques.

3M France
Division Prévention des Infections
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 30 31 81 61
Fax : 01 30 31 85 65
www.3m.fr/preventiondesinfections

* 3M Science. Au service de la Vie.

Equipements de Protection Individuelle selon la Directive 89/686. Norme EN149:2001 + A1:2009. Avis du J.O. n° 135 du 28/09/2005.
Dispositifs Médicaux de classe I selon la Directive 93/42 CEE relative aux Dispositifs Médicaux. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne.
Norme EN 14683:2005 Type IIR. Avant toute utilisation, s'assurer que le choix du masque utilisé correspond à l'utilisation et niveau de protection souhaités. Se reporter aux mentions figurant sur l'emballage. Distribués par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.



IPD-000002 - Dec 2016. Photos non contractuelles.

3M Science.
Applied to Life.™

Protocole d'utilisation

Masques chirurgicaux 3M™ avec liens

Lavage hygiénique des mains - Identification des faces interne et externe



- ▶ Face externe : colorée ou présence du logo 3M.



- ▶ Face interne : blanche. Feuille interne : doux.

Préparation du masque



- ▶ Barrette nasale vers le haut, placer les doigts sur la face interne.



- ▶ Placer l'index au milieu de la barrette nasale. Le pouce et le majeur sont en contre-appui sur la face externe du masque.



- ▶ Appliquer une pression sur l'index afin de plier la barrette nasale. Le pouce et le majeur viennent replier la barrette autour de l'index permettant d'arrondir cette dernière.



- ▶ Avec le pouce et l'index de la main opposée, repousser la barrette nasale. La barrette a une forme arrondie pour épouser la crête nasale sans la blesser.



- ▶ Ouvrir le masque dans le sens des plis : face externe convexe, face interne concave.

Mise en place du masque



- ▶ Le masque est prêt à être positionné sur le visage. Le masque doit couvrir le sommet de la crête nasale jusqu'à sous le menton.



- ▶ Pour la mise en place, le lien supérieur est attaché en premier, puis est attaché le lien inférieur. La tension des liens à nouer doit permettre la meilleure congruence du masque sur le visage. Ne jamais croiser les liens.

3M France
Division Prévention des Infections
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 30 31 82 82
Fax : 01 30 31 85 65
www.3m.fr/preventiondesinfections

Dispositifs Médicaux de classe I selon la Directive 93/42 CEE relative aux Dispositifs Médicaux. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Avant toute utilisation, s'assurer que le choix du masque utilisé correspond à l'utilisation et niveau de protection souhaités. Se reporter aux mentions figurant sur l'emballage. Distribués par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.



IPD-000002 - Dec 2016. Photos non contractuelles.

3M Science.
Applied to Life.™

Protocole d'utilisation

Masques chirurgicaux 3M™ à fixations auriculaires élastiques

Lavage hygiénique des mains - Identification des faces interne et externe



- ▶ Face externe : colorée ou présence du logo 3M.



- ▶ Face interne : blanche. Feuille interne : doux.

Préparation du masque



- ▶ Barrette nasale vers le haut, placer les doigts sur la face interne.



- ▶ Placer l'index au milieu de la barrette nasale. Le pouce et le majeur sont en contre-appui sur la face externe du masque.



- ▶ Appliquer une pression sur l'index afin de plier la barrette nasale. Le pouce et le majeur viennent replier la barrette autour de l'index permettant d'arrondir cette dernière.



- ▶ Avec le pouce et l'index de la main opposée, repousser la barrette nasale. La barrette a une forme arrondie pour épouser la crête nasale sans la blesser.



- ▶ Ouvrir le masque dans le sens des plis : face externe convexe, face interne concave.

Mise en place du masque



- ▶ Le masque est prêt à être positionné sur le visage. Le masque doit couvrir le sommet de la crête nasale jusqu'à sous le menton.



- ▶ Placer les élastiques derrière les oreilles.

3M France
Division Prévention des Infections
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 30 31 82 82
Fax : 01 30 31 85 65
www.3m.fr/preventiondesinfections

* 3M Science. Au service de la Vie.

Dispositifs Médicaux de classe I selon la Directive 93/42 CEE relative aux Dispositifs Médicaux. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Avant toute utilisation, s'assurer que le choix du masque utilisé correspond à l'utilisation et niveau de protection souhaités. Se reporter aux mentions figurant sur l'emballage. Distribués par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.



IPD-000002 - Dec 2016. Photos non contractuelles.

Vidéo en français : comment bien poser un masque de protection



Webinar en français : comment garantir une utilisation sûre des masques en milieu hospitalier



Comment garantir une utilisation sûre des masques en milieu hospitalier

Mardi 29 septembre 2020

<https://attendee.gotowebinar.com/recording/182158700354525442>

Merci de votre
attention.

